

ANTIALERGIJSKA NAPRAVA *medinose*⁺

- + dolgotrajen učinek
- + alergijske reakcije in iritacije se zmanjšajo ali popolnoma izginejo
- + ni stranskih učinkov
- + uporaba tudi v preventivne namene
- + omogoča zadrževanje na prostem v času senene mrzlice
- + uporaba je možna povsod: doma, na potovanju, v vozilu...
- + primerno za nosečnice in diabetike

Revolucionarno ZDRAVLJENJE ALERGIJ doma s fototerapijo

Če alergijskega nahoda ne zdravimo, se lahko razvije v BRONHITIS ali ALERGIJSKO ASTMO.



**3x dnevno
4,5 min**

Na voljo v lekarnah
Klinično testirano
3 leta garancije

Medinost je učinkovit pred naslednjimi alergijami:

- SENENI NAHOD
- HIŠNI PRAH
- ŽIVALSKA DLAKA

MEDISANA[®]
PROLAT d.o.o.
www.prolat.si
prolat@siol.net

Dodatne informacije
po telefonu
07/30 44 555



Najpogosteje zastavljena vprašanja

1. Ali lahko z uporabo naprave Medinose preprečim seneni nahod?

Če poznate vrsto peloda, na katerega ste alergični, lahko s pomočjo naprave Medinose pričnete z zdravljenjem približno teden pred začetkom pojava alergena, in sicer trikrat dnevno. S terapijami nadaljujte ves čas senenega nahoda. Če simptomi alergije upadajo, lahko skladno s tem zmanjšate število terapij na eno ali dve terapiji dnevno. Učinkovitost terapij se zaradi tega ne bo zmanjšala.

2. Mi lahko Medinose pomaga pri alergiji na mačke?

Medinose varuje membrano nosne sluznice pred povzročitelji alergij, torej ne le pri senenem nahodu, temveč tudi pri alergijah na hišni prah in na živalsko dlako.

3. Kako pogosto moram izvajati terapijo?

Na začetku zdravljenja vsaj trikrat dnevno. Vsaka terapija traja približno 4 minute in pol. Po preteku tega časa se naprava samodejno izključi, kar zagotavlja, da terapija traja vedno enako dolgo.

4. Koliko časa moram uporabljati Medinose?

To je odvisno od jakosti alergije in snovi, na katero ste alergični. Medinose je potrebno začeti uporabljati takoj, ko pridete v kontakt z alergenom (to je snov, na katero ste alergični). Če se simptomi alergije med zdravljenjem v tednu ali dveh izboljšajo, lahko število terapij zmanjšate. Kljub izboljšanju pa je priporočljivo, da v času prisotnosti pelodnega prahu napravo Medinose uporabite nekajkrat tedensko ali celo dnevno, saj s tem preprečite ponovitev težav. Večina uporabnikov opazi občuten napredek že po dveh tednih zdravljenja.

5. Kdaj je najbolje uporabiti Medinose?

Če terapijo opravljate dvakrat dnevno, je najbolj enostavno, da opravite eno zjutraj pred zajtrkom ali po njem ter eno zvečer pred spanjem. Če je potrebno, lahko tretjo terapijo opravite popoldne. Medinose je priročen za uporabo celo na potovanju.

6. Jemljem zdravila proti alergiji. Jih moram še vedno jemati?

Medinose nima nikakršnega vpliva na delovanje zdravil. Teoretično lahko hkrati uporabljamo Medi-

nose in jemljemo zdravila, vendar je dokazano, da se z uporabo naprave Medinose simptomi alergije zmanjšajo, tako da lahko posledično zmanjšamo tudi količino zdravil.

7. Nimam nobenih težav z nosom, alergija povzroči le zatečene oči in neznosen kašelj. Mi Medinose lahko pomaga pri tem?

Solzenje oči in drugi alergijski simptomi se pojavijo zaradi izločanja histamina iz celic v membrani nosne sluznice. Fototerapija naprave Medinose deluje direktno na membrano nosne sluznice. Tako s pomočjo terapije rdeče svetlobe ne izginejo le težave z nosom, temveč tudi neprijeten utesnjujoč občutek, povezan z alergijami, ter otečene ali solzne oči, kašelj, srbenje in glavoboli.

8. Kdaj bom opazil prve znake zdravljenja?

Olajšanje težav je lahko opazno po že nekaj terapijah, vendar pa boste pravo izboljšanje občutili po dveh do treh tednih.

9. Kako Medinose deluje?

Na podlagi fototerapije (svetlobne terapije). Diode,

vstavljene v nosnice, oddajajo vidno rdečo svetlobo z valovno dolžino približno 660 nm. Ta svetloba zmanjšuje alergijske reakcije ter preprečuje razdraženost sten celic nosne membrane.

10. Ali so znani kakršni koli stranski učinki?

Ne! To je popolnoma naravna metoda zdravljenja. Antialergijska naprava Medinose v telo ne vnaša nobenih zdravil. Koncentracija osebe in njena zmožnost za vožnjo nista ogroženi.

11. Lahko medinose uporabljajo tudi moji otroci?

Naprava nima nikakršnih stranskih učinkov, tako da Medinose zlahka uporabljajo tudi otroci. Iz higienskih razlogov priporočamo, da za vsakega uporabnika kupite dodaten zamenljiv nastavek.

12. Kako naj očistim nastavek za v nosnice?

Previdno ga očistite z robčkom.

13. Je Medinose klinično testiran?

Da. Medinose je bil testiran v kliničnih študijah. Pri več kot 70 % pacientov je bilo mogoče zaznati bistveno zmanjšanje alergijskih reakcij.

Kaj je alergija?

Alergija je pretirana reakcija imunskega sistema telesa na delce tujih substanc iz okolja.

Imunski sistem reagira na substance (npr. pelod), ki praviloma niso škodljive za zdravje. Nastanejo protitelesa in organizem prepozna neškodljive substance kot nevarne ter reagira, kot da so patogeni elementi, proti katerim se je treba boriti.

Znanih je približno 20.000 substanc, ki povzročajo alergije.

Simptomi senenega nahoda / alergijskega nahoda

- Iritacija nosu
- Kihanje
- Velike količine izločanja sluzi (do 20 mililitrov na dan)
- Rdeče, srbeče in solzne oči
- Reakcija nosne sluznice
- Glavoboli
- Prizadete glasilke
- Omejena sposobnost voha
- Omejena sposobnost okušanja

Nevarnost nastanka astme

Če alergijskega nahoda ne zdravimo, se lahko razvije v

- bronhitis
- alergijsko astmo (na pelod)

Skoraj vse leto je čas alergij

- Drevesa: februar - junij
- Trava: maj - avgust
- Zelišča: julij - september

Najbolj pogosta oblika alergije je alergija na travo.

Obstoječa sredstva proti alergijskemu nahodu

- Močna antialergijska zdravila in zdravila proti vnetju
- Spreji za nos
- Kapljice za oči
- Zdravila, ki vsebujejo kortizon

