

DIGITALNI ALKOTESTER JC 243



JC 243 s svojim naprednim senzorjem pretvarja koncentracijo alkohola v vaši sapi (izdihu) v enako koncentracijo alkohola v krvi.

OPOZORILO

Digitalni tester vam omogoča določanje stopnje alkohola v krvi v trenutku testiranja. Koncentracija alkohola v krvi se spreminja s časom. Na samo meritev lahko vplivajo tudi različni dejavniki iz okolja.

Izdelek se uporablja samo v referenčne namene ter promovira odgovorno in varno vožnjo. Ne nadomešča niti ne izključuje testov, ki jih izvajajo uradne osebe. Vrednosti nimajo zakonske osnove, niti vas ne rešijo odgovornosti. Ne zanašajte se samo na rezultate tega testiranja, da bi z gotovostjo lahko sklepali, ali lahko vozite ali lahko upravljate z določenim aparatom ali se lahko vključite v nevarne aktivnosti. Proizvajalec ne odgovarja v primeru nepravilne uporabe tega izdelka.

Karakteristike

- najnovejši digitalni senzor alkohola
- hiter odziv: 8 s
- SMD komponente, stabilno delovanje
- Kontrola s pomočjo mikrokontrolerja
- Direktn prikaz testa na LCD ekranu
- Majhen, kompakten design
- Ne potrebuje ustnika
- Zvočni signal, ko se prekorači dovoljena zgornja meja
- Indikator slabe baterije
- Avtomatska izključitev po 8s neuporabe

Uvoz in distribucija:

TRIFILON Raziskave in razvoj d.o.o.
Rimska c. 20 1000 Ljubljana
TEL: 01 251 2173
E-mail: prodaja@trifilon.si
WEB: www.trifilon.si

Cena: 10.710,00 SIT / 44,69 EUR

Varnostni napotki:

- pred prvo uporabo obvezno preberite ta navodila
- Izdelek uporabljajte samo namensko
- v primeru dvoma o pravilnosti delovanja, ga ne uporabite ampak se obrnite na proizvajalca ali prodajalca
- izdelek shranjujte stran od grelcev, direktnih sončnih žarkov, vlage in ostrih predmetov
- odstranite baterije, če ga dalj časa ne uporabljate
- ne popravljate ga sami, v primeru nedelovanja ga predajte pooblaščenemu servisu ali prodajcu


PRIKAZ NA EKRANU

% BAC: % alkohola v sapi

WAIT: enota se pripravlja, počakajte

BLOW: enota je pripravljena

Battery used up: Baterija izrabljena, prosimo zamenjajte baterijo

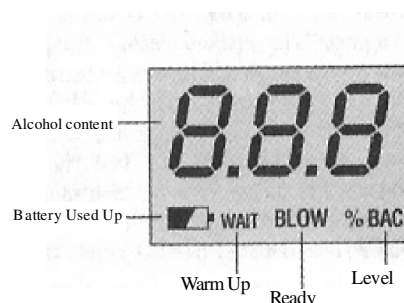

V primeru, da ste popili več od prednastavljene zgornje meje, bo enota oddala zvočni signal.

TEHNIČNE INFORMACIJE:

- Najnovejši digitalni senzor
- Razpon detekcije od 0.000 do 0.20% koncentracije alkohola v sapi (BAC)
- Točnost $\pm 10\%$ pri 0.05 % koncentracije alkohola v sapi (BAC)
- Postavljena mejna vrednost: 0.05 %
- Čas aktivacije senzorja < 18 s
- Čas analize vrednosti: 8 s
- Prikaz 3 številke LCD z rdeče osvetljenim ekranom
- Napajanje 3 VDC 2 AAA baterije
- Delovni pogoji 0°C~45°C, 95%RH
- Dimenzije: 90mm X 30mm X 16mm
- Teža 45g (skupaj z baterijami)

PRED UPORABO NAPRAVE:

Pokrov naprave potisnite navzdol, da se vam odpre prostor za baterije. Vložite baterije pravilno - pazite na polariteto in potisnite pokrov nazaj. Za doseglo pravih rezultatov ne smete kaditi, ne jesti mentol bonbonov, čokolade, niti ne uživati kakih zdravil. Ne uporabljajte naprave v vetrovnem okolju, ali v zakajenih prostorih. Naprave ne močite, niti je ne brišite s sredstvi za čiščenje.

KDAJ PRIPOROČAMO UPORABO

Za pravilno odčitavanje uporabite napravo šele po 45 minutah po zadnji konzumaciji alkohola. S tem počakamo, da kri v celoti absorbira zaužiti alkohol.

V nasprotnem primeru bodo rezultati naslednji:

V prvih 7 minutah po zaužitju alkohola bo vsebnost alkohola v sapi zelo velika, ker se alkohol iz ust izloči nekako po 7 minutah, nato traja še nekaj časa, da ta pride v kri. Zato v tem času rezultat zelo varira.

Navodila za pravilno uporabo naprave:

Pritisnite tipko na sprednji strani pod ekranom (stikalo), ekran se prižge in zasliši se zvočni signal. Na ekranu se izpiše napis **Wait** in v času 18s se naprava pripravlja. Ko se izpiše napis **Blow**, je naprava pripravljena na uporabo. Globoko vdihnite in pihajte v odprtino (vhod sape) približno 3 cm stran od senzorja. Po 8s se bo na ekranu izpisal rezultat in oglasil se bo zvočni signal. Za tem se naprava sama izključi. Za ponovno merjenje ponovimo cel postopek aktivacije. Med dvema meritvama naj preteče najmanj 60s.

Pomembna navodila

Naprava je občutljiva na udarce, padce, zato jo pazite.
Napravo shranjujte na suhem, stran od izvorov toplote.
Za čiščenje ne uporabljajte čistilnih sredstev, ker lahko z njimi poškodujete senzor.
Napravo shranjujte stran od dosega otrok.
Naprave ne močite z vodo, niti je ne potopite v kako drugo tekočino.
V zakajenem prostoru bodo meritve netočne.
Naprava je prednastavljena na vrednosti, ki so v veljavi v EU (0.05% do 0.5%).
Po daljšem skladiščenju, če je v zraku prisotna večja koncentracija alkohola, nekajkrat prižgite in ugasnite napravo, da se stabilizira na vrednost 0,00.

Shranjevanje

Po izteku uporabe napravo odvrzite v skladu z veljavnimi predpisi.

Garancija:

TRIFILON d.o.o. kot uvoznik in distributer za območje RS garantira ob upoštevanju teh navodil pravilno delovanje 5 let od nakupa. TRIFILON d.o.o garantira vsa popravila in dobavo rezervnih delov najmanj 6 let od nakupa. Ta garancija velja za prvega kupca in ni prenosljiva.

DATUM NAKUPA:

PEČAT PRODAJALCA:

.....

PODPIS PRODAJALCA :.....

V primeru reklamacije se obrnite na:

TRIFILON Raziskave in razvoj d.o.o.
Rimska c. 20 1000 Ljubljana
TEL: 01 251 2173
E-mail: prodaja@trifilon.si
WEB: www.trifilon.si